



Strzykawka - do Płukania Przewodu Słuchowego



Product codes:

Reference: PLŻANETA

Product short description:

Strzykawka o dużej pojemności specjalnie przygotowana do końcówek OtoClear.

Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy starymi znanymi sposobami wodnego usuwania woszczyny a nowoczesnym w pełni kontrolowanym systemem do tego przygotowanym.

Product description:

Strzykawka o dużej pojemności (żaneta) specjalnie przygotowana do końcówek OtoClear. Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy starymi ogólnie znanymi sposobami wodnego usuwania woszczyny a nowoczesnym w pełni kontrolowanym systemem do tego przygotowanym.

Końcówka OtoClear + dostosowana strzykawka o dużej pojemności - żaneta stanowią przydatne narzędzie płukania przewodu słuchowego m.in. podczas wizyty domowej.

Uwaga:
Strzykawka 100ml i końcówki OtoClear **sprzedawane są oddzielnie**.
Montaż zestawu żaneta + końcówka OtoClear odbywa się z zastosowaniem przejściówki dołączonej z żanetą, znajdującej się w bocznej części tłoczka strzykawki. Element ten należy zamontować na ujście strzykawki po czym nałożyć końcówkę OtoClear.

Kształt końcówki OtoClear zabezpiecza przed zbyt głęboką aplikacją urządzenia do przewodu słuchowego.
Specjalny spin wody (nadany przez otwory w wyprofilowanej końcówce OtoClear) usuwa woszczynę nie podrażniając



nabłonka przewodu słuchowego.

Strumień wody skierowany jest na ścianki przewodu słuchowego, a nie w błonę bębenkową. Nie należy stosować płukania ucha przy: bólu ucha, wyciekach z ucha, zawrotach głowy, perforacji błony bębenkowej i cukrzycy. W wypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Po operacji ucha wodne płukanie przewodu słuchowego trzeba również skonsultować z lekarzem.

- skuteczność zastosowania strzykawki o dużej objętości - żanety jest nieporównywalnie mniejsza wobec nowoczesnych systemów płukania przewodu słuchowego,
- strzykawka - tzw. żaneta z gumowym tłoczkiem nie pozwala na dokładne kontrolowanie siły strumienia wody,
- końcówka OtoClear generuje spinalny strumień wody, który usuwa woszczyne najdokładniej tylko w określonym przedziale ciśnień.

Strzykawka może wywoływać negatywne konotacje u małych pacjentów.

Strzykawka 100ml, sterylna, wyposażona w gumowy tłoczek i przejściówkę dla końcówki OtoClear posiada międzynarodowy certyfikat CE, wyprodukowano w Polsce. Produkt opatentowany.

W zestawie: strzykawka 100 ml i przejściówka do końcówek OtoClear - **zestaw nie zawiera końcówek OtoClear.**

Kończówka OtoClear + dostosowana strzykawka o dużej pojemności stanowi przydatne narzędzie płukania przewodu słuchowego m.in. podczas wizyty domowej.

Product features:

Product attributes:

