




OtoClear - końcówka systemu Waterpik / OtoClear

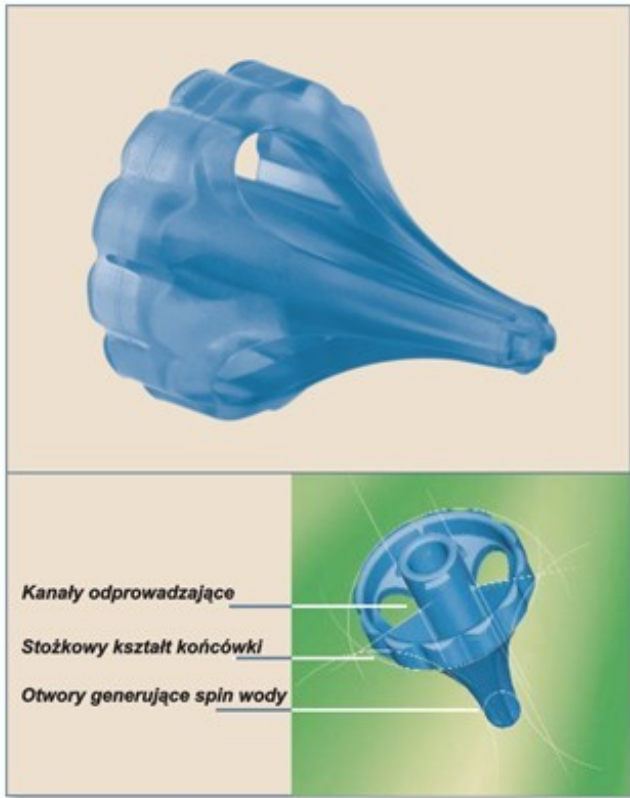

Product codes:

Reference: BXOC1

Product short description:

Bezpieczny system OtoClear został stworzony by skutecznie usuwać woszczyne z przewodu słuchowego.

Product description:

Bezpieczny system OtoClear został stworzony by skutecznie usuwać woszczyne z przewodu słuchowego.

Cechy wymiennej końcówki OtoClear:

Kształt końcówki zabezpiecza przed zbyt głęboką aplikacją urządzenia do przewodu słuchowego.

specjalny spin wody (nadany przez otwory w wyprofilowanej końcówce) skutecznie usuwa woszczyne nie podrażniając nabłonka przewodu słuchowego.

strumień wody skierowany jest na ścianki przewodu słuchowego, a nie w błonę bębenkową,

tak ukierunkowany strumień wody eliminuje efekty występujące w innych technikach wodnego płukania ucha - takich jak: zawroty głowy, senność, przemieszczenie woskowiny w głąb kanału usznego, perforacja lub inne schorzenia błony



bębenkowej.



Wszystkie produkty firmy Bionix przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości. Sprawdzana jest gładkość powierzchni i staranność wykonania zaokrągleń krawędzi. Nie ma możliwości by wadliwy produkt opuścił fabrykę. Barwniki i polimery użyte w procesie produkcji spełniają normy Amerykańskiego Ministerstwa Leków i Żywności (FDA).

Opakowanie zawiera 10szt. wymiennych końcówek do systemu Waterpik / OtoClear.

FAQ - Pytania często zadawane:

Pytanie:

Czy istnieją różne kształty i wielkości wymiennych końcówek OtoClear?

Odpowiedź:

Nie istnieją - Przez ostatnie 20 lat z inicjatywy firmy Bionix Medical Technologies w USA trwały prace nad kształtem końcówki, która byłaby uniwersalna dla każdego pacjenta - zarówno dla dziecka i osoby dorosłej. Różnorodność kształtu analizowanych małżowin usznych przez ten czas pozwala na stwierdzenie iż końcówka jest odpowiednia zarówno dla pacjenta pediatrycznego i dorosłego.

Pytanie:

Czy mogę poprosić lekarza o zakroplenie kropeł rozmiękczających woszczek A-CERUMEN przed płukaniem przewodu słuchowego systemem Otoclear / Waterpik?

Odpowiedź:

Tak oczywiście. Krople rozmiękczą cerumen i ułatwią jego ewakuację podczas płukania przewodu słuchowego. Proszę pamiętać, że istnieją liczne przeciwwskazania zastosowania kropeł na woszczek.

Pytanie:

Jak zasilany jest system Waterpik w wersji bezprzewodowej?

Odpowiedź:

System zasilają ogniwa elektryczne, które są zamontowane w rękojeści urządzenia. Dzięki temu system jest całkowicie mobilny i bezprzewodowy. W skład zestawu wchodzi ładowarka.



Uwaga: nie stosować urządzenia podczas ładowania ogniw elektrycznych.

Pytanie:

Jak zasilany jest system Waterpik w wersji stacjonarnej (Unit)?

Odpowiedź:

Zasilany jest prądem zmiennym 220V, który czerpie z sieci elektrycznej (tzw. gniazdka). Przewód prądowy ma długość 110 cm.

Nie wymaga uziemienia.

Pytanie:

Czym różni się Waterpik w wersji stacjonarnej (Unit) od bezprzewodowej?

Odpowiedź:

Oto cechy systemu w wersji stacjonarnej (Unit), które nie występują w wersji bezprzewodowej:

- 3 x wyższe ciśnienie strumienia wody,
 - płynna regulacja strumienia wody,
 - większy zbiornik wody 1000 ml,
 - pracujący unit płuczący jest dużo cichszy wobec systemu bezprzewodowego,
 - stale podłączone, niezbędne do pracy zasilanie 220V*
 - przewód wodny o długości 100 cm łączący zbiornik wody z rękojeścią płuczącą*
- * - maszyna trwale związana z miejscem pracy. Na wygodę pracy z pacjentem wpływa obecność przewodu wodnego. Niezbędne napięcie 220V w czasie pracy urządzenia.

Product features:

Product attributes:

opakowanie otoclear: 5 sztuk, 10 sztuk, 20 sztuk, 40 sztuk

