



Wzrostomierz ultradźwiękowy - przenośny stadiometr CHARDER HM250U



Product codes:

Reference: HM250U

Product short description:

Wzrostomierz elektroniczny ultradźwiękowy pozwala na dokładny pomiar wzrostu w praktycznie wszelkich sytuacjach.

Product description:

Wzrostomierz elektroniczny ultradźwiękowy pozwala na dokładny pomiar wzrostu w praktycznie wszelkich sytuacjach **bez konieczności przenoszenia nieporęcznego** stadiometru czy prowizorycznego mocowana wzrostomierza na ścianie. Jest to również rozwiązanie idealne dla gabinetów dietetycznych gdzie większość analizatorów składu ciała nie posiada zamontowanego wzrostomierza.

Przenośny wzrostomierz - stadiometr wykorzystuje dwa czujniki ultradźwiękowe i automatycznie kalibrujące się sensory, aby zapewnić dokładny pomiar wysokości.

Jego wymiary po złożeniu wynoszą: 34,9 cm x 6,4 cm x 2,3 cm, a waga: 200 g, więc jest idealny do dokładnego pomiaru wzrostu gdziekolwiek sobie życzysz.

Dane techniczne:



-
- Zakres pomiaru: 50-250 cm,
 - Dokładność: 0,1 cm,
 - Wymiary po rozłożeniu: 34,9 cm x 31,5 cm x 3 cm,
 - waga urządzenia: 200 g,
 - zasilany 2 bateriami AAA.

Jak prawidłowo korzystać z ultradźwiękowego wzrostomierza HM250U - instrukcja:

- Umieść ogranicznik nad głową pacjenta jak najdalej od jego ciała (fale ultradźwiękowe mogą odbijać się od jego stóp lub ciała zamiast od podłoża, wpływając na dokładność pomiaru)
- Trzymaj wzrostomierz w pozycji pionowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ trzymany pod kątem będzie wskazywać większą odległość.
- Sprawdź, czy Twoje stopy nie przeszkadzają (nie znajdują się na linii fal ultradźwiękowych)
- Upewnij się, że podłoga jest twarda i nieodblaskowa (sygnał może zostać zakłócony, jeśli odbije się od miękkich powierzchni takich jak wykładziny, dywany, oraz od podłóg marmurowych i „na połysk”).
- Podczas pomiaru używaj dwóch rąk (trzymając HM250U w pozycji pionowej jedną ręką, naciskając przycisk "pomiar" drugą ręką). Upewnij się, że ręka trzymająca wzrostomierz nie blokuje dolnego czujnika.

Product features:

Product attributes:

