



Elektroniczna waga medyczna niemowlęca z legalizacją CHARDER MS5980 z bezprzewodową transmisją danych z wzrostomierzem



Product codes:

Reference: MS5980+HM80DT

Product short description:

CHARDER MS5980 to legalizowana (klasa III) waga niemowlęca. Łatwa integracja bezprzewodowa z EMR placówki medycznej (**EMR ready**). Oczywiście może też działać samodzielnie lub przysyłać pomiary bezpośrednio do 1 urządzenia.

Product description:



Cały proces następuje automatycznie - od skanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych poprzez dodanie pomiaru wzrostu zainstalowanym na wadze wzrostomierzem oraz dalszą transmisję danych, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzania danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dane pomiarowe wyświetlane są również na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wagi.

Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych zadaniach!




Dane techniczne:

- Obciążenie maksymalne: 15 kg
- Dokładność odczytu: 2g 6kg > 5g
- Wyświetlacz LCD dotykowy.
- Zasilanie: akumulatorowe i sieciowe (zasilacz w zestawie).
- Funkcje: Hold, Tare, Pre-Tare.
- **Opcjonalnie do wagi niemowlęcej:** skaner.

Dane techniczne wzrostomiarki elektronicznej HM80DT

- Zakres pomiaru: 35 - 80 cm
- Podziałka: 1 mm

Cechy i funkcje panelu wagi CHARDER MS5980:

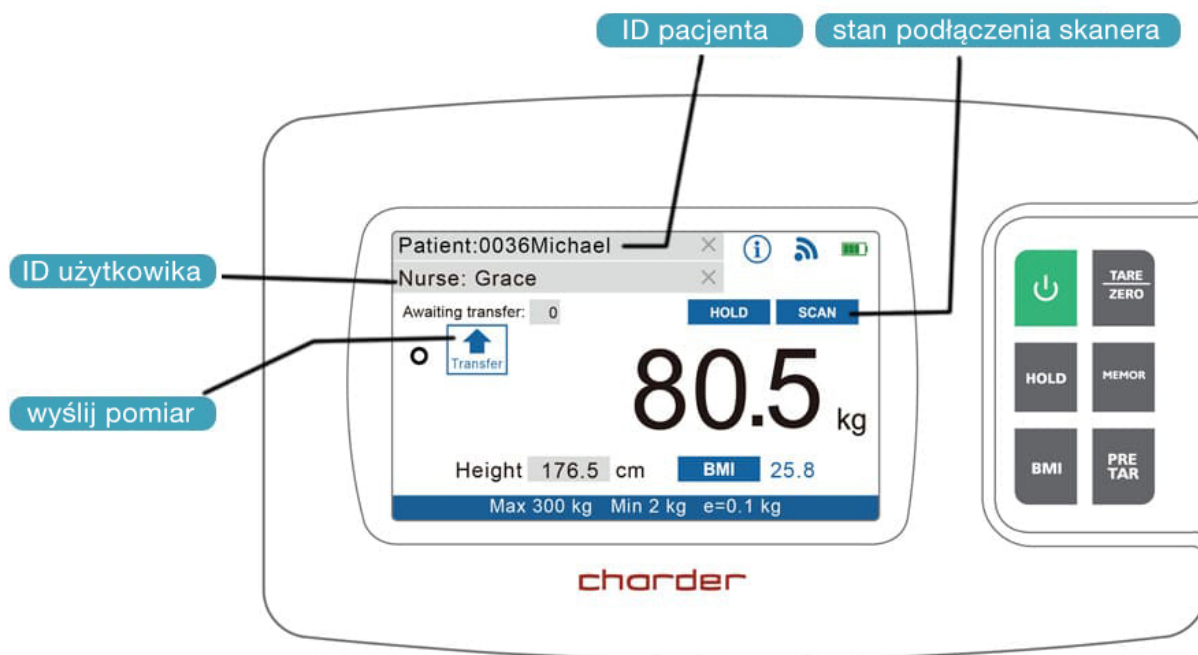

Suma cech (czytnik kodów paskowych, automatyczne przesłanie danych i możliwa łatwa integracja z systemem placówki medycznej) stawia o nowatorstwie urządzenia, które w tej formie jest kompetentną nowością na rynku.

Produkty marki Charder mimo najwyższej jakości wykonania i nowatorstwa są najczęściej tańsze od produktów konkurencyjnych.

Pomiar pacjenta przy użyciu bezprzewodowej wagi niemowlęcej CHARDER MS5980 dokonywany jest w następujących krokach:

1. Nadaj niemowlęciu identyfikator - ID pacjenta aby urządzenie mogło szybko skanować i zapisywać wyniki podczas procedury pomiarowej.
2. Wysterylizuj platformę i w razie potrzeby wprowadź odliczenie wagi przed pomiarem (PRE-TARA). Zeskanuj identyfikator użytkownika i niemowlęcia lub wprowadź ręcznie dane za pomocą ekranu dotykowego.
3. Pomiar wagi zostanie dokonany automatycznie, ustaw wzrostomierz do długości dziecka - wartość zebrana zostanie



automatycznie (przy zastosowaniu wzrostomierza elektronicznego).

4. Prześlij dane pomiaru do systemu informatycznego placówki medycznej,
5. Zobacz wyniki w systemie - Porównaj wyniki z poprzednimi pomiarami, aby przeanalizować trendy. Oprogramowanie jest bezpłatne.



Product features:

Product attributes:

z wzrostomierzem: wzrostomierzem elektronicznym HM80DT, wzrostomierzem elektronicznym HM80DT i skanerem

