

Retinometr Heine Lambda 100, główka optyczna



Nr Katalogowy C-001.35.010

skiaskopy napięcie: główka optyczna ze skalą nr. 1, główka optyczna ze skalą nr. 2

Retinometr LAMBDA 100 jest pierwszym kompaktowym instrumentem służącym do określania potencjalnej ostrości wzroku u pacjentów z zaćmą i innymi schorzeniami soczewki.

waga: 100 g

Retinometr LAMBDA 100 jest pierwszym kompaktowym instrumentem służącym do określania potencjalnej ostrości wzroku u pacjentów z zaćmą i innymi schorzeniami soczewki.

- Prosty i łatwy w zastosowaniu. Pewne rozpoznanie, łatwy w obsłudze.
- Można zastosować zasilanie z rękojeści bateryjnych oraz akumulatorowych. To umożliwia mobilność lekarza z instrumentem.
- Kompaktowy, lekki (100 g). Można go używać wszędzie, nawet u obłożnie chorych.
- Ksenonowo-halogenowa technologia oświetlenia z możliwością kontroli natężenia światła. Zapobiega oślepieniu pacjenta.
- Zasilanie rękojeściami HEINE BETA

Trzy kroki przy określaniu potencjalnej ostrości wzroku retinometrem LAMBDA 100

-
1. Włącz instrument, wybierz żądaną ostrość, wybierz kąt kratki, zredukuj oświetlenie otoczenia.
 2. Przyłóż retinometr do czoła pacjenta. Oswieć źrenicę czerwonym światłem, aby znaleźć „okienko” przez które pacjent może rozpoznać kratowany wzór i określić jego kąt.
 3. Wybieraj sukcesywnie kratowane wzory pod różnym kątem, dopóki pacjent nie będzie w stanie określić kąta. Wartość ostatniego rozpoznanego kąta oznacza potencjalną ostrość wzroku.