

Bezprzewodowy System Płukania Przewodu Słuchowego Waterpik / OtoClear



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: BXWATERPIKPRZ

Krótki opis:


Bezpieczny system Waterpik / OtoClear został stworzony by skutecznie usuwać woszczyne z przewodu słuchowego. Obudowa w kolorze białym. W zestawie 1 szt OtoClear.

Opis produktu

Bezpieczny system Waterpik / OtoClear został stworzony by skutecznie usuwać woszczyne z przewodu słuchowego. Kształt końcówki zabezpiecza przed zbyt głęboką aplikacją urządzenia do przewodu słuchowego. Specjalny spin wody (nadany przez otwory w wyprofilowanej końcówce) skutecznie usuwa woszczyne nie podrażniając nabłonka przewodu słuchowego.

Strumień wody skierowany jest na ścianki przewodu słuchowego, a nie w błonę bębenkową.

Tak ukierunkowany strumień wody eliminuje efekty występujące w innych technikach wodnego płukania ucha - takich jak: zawroty głowy, senność, przemieszczenie woskowiny w głąb kanału usznego, perforacja lub inne schorzenia błony bębenkowej.

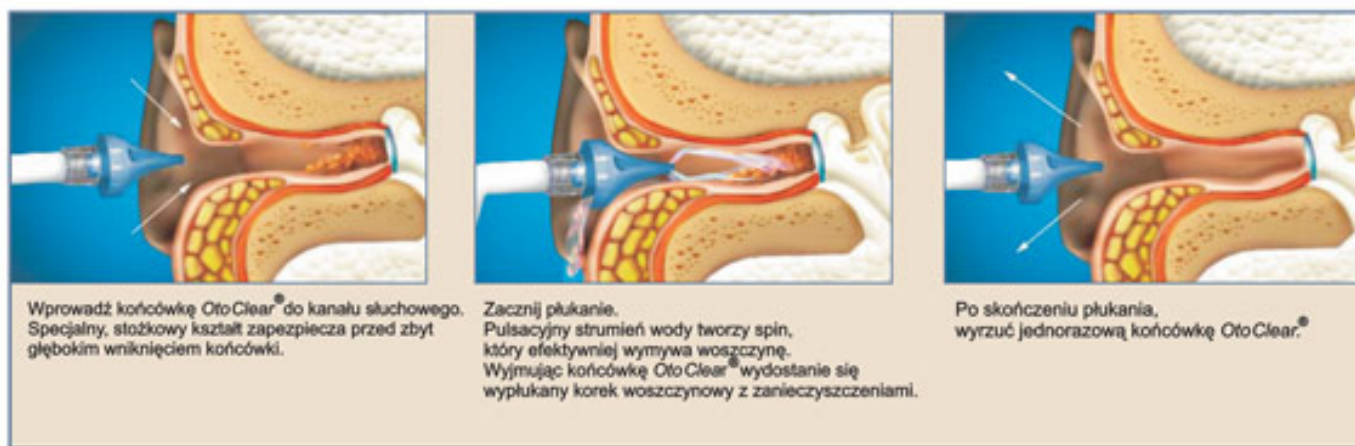

Systemu płukania ucha nie stosować przy: bólu ucha, wyciekach z ucha, zawrotach głowy, perforacji błony bębenkowej, cukrzycy. W wypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Po operacji ucha użycie systemu Waterpik trzeba również skonsultować z lekarzem.

Zalety usuwania woszczyny z pomocą systemu Waterpik / Końcówki OtoClear:

- Środkiem czyszczącym jest woda,
- w kanale słuchowym nie zachodzą żadne reakcje chemiczne,
- płukanie nie zmienia właściwego pH kanału słuchowego,
- pulsacyjny strumień wody łatwiej i dokładniej usuwa korek woszczynowy,
- spin wody powoduje, iż strumień nie uderza bezpośrednio w błonę bębenkową, nie wywołuje uczucia zawrotów głowy,
- wymienna końcówka zbudowana bez użycia lateksu,
- właściwie dobrane ciśnienie wyklucza uszkodzenie błony bębenkowej,
- wbudowany zbiornik wody 155 ml - jest to wystarczająca wielkość zasobnika z racji wysokiej skuteczności płukania pulsacyjnym strumieniem wody,
- w komplecie zasilacz 220V ładujący, umieszczone w urządzeniu ogniwa ładowalne,
- produkt posiada międzynarodowy atest CE, wyprodukowano w USA,
- produkt opatentowany.

System wizualnie nie przypomina klasycznej stosowanej do wodnego usuwania woszczyny strzykawki o dużej pojemności (tzw. żanety), której tak bardzo obawiają się mali pacjenci.

Produkt posiada międzynarodowy atest CE, wyprodukowano w USA.

Produkt opatentowany.

uwaga: nie stosować urządzenia podczas ładowania ogniw elektrycznych

Wszystkie produkty firmy Bionix przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości.

Sprawdzana jest gładkość powierzchni i staranność wykonania zaokrągleń krawędzi.

Nie ma możliwości by wadliwy produkt opuścił fabrykę. Barwniki i polimery użyte w procesie produkcji spełniają normy Amerykańskiego Ministerstwa Leków i Żywności (FDA).

Basen Uszny to naczynie zabezpieczające zarówno pacjenta jak i lekarza przed pochłapaniem podczas wodnego usuwania woszczyny zarówno klasyczną strzykawką o dużej pojemności (tzw. żanetą), jak i nowoczesnymi systemami do tego przeznaczonymi.

FAQ - Pytania często zadawane:

Pytanie:

Czy istnieją różne kształty i wielkości wymiennych końcówek OtoClear?

Odpowiedź:

Nie istnieją - Przez ostatnie 20 lat z inicjatywy firmy Bionix Medical Technologies w USA trwały prace nad kształtem końcówki, która byłaby uniwersalna dla każdego pacjenta - zarówno dla dziecka i osoby dorosłej.

Różnorodność kształtu analizowanych małżowin usznych przez ten czas pozwala na stwierdzenie iż końcówka jest odpowiednia zarówno dla pacjenta pediatrycznego i dorosłego.

Pytanie:

Czy mogę poprosić lekarza o zakroplenie kropeł rozmiękczających woszczek A-CERUMEN przed płukaniem przewodu słuchowego systemem Otoclear / Waterpik?

Odpowiedź:

Tak oczywiście. Krople rozmiękczą cerumen i ułatwią jego ewakuację podczas płukania przewodu słuchowego.

Proszę pamiętać, że istnieją liczne przeciwwskazania zastosowania kropeł na woszczek.

Pytanie:

Jak zasilany jest system Waterpik w wersji bezprzewodowej?

Odpowiedź:

System zasilają ogniwa elektryczne, które są zamontowane w rękojeści urządzenia. Dzięki temu system jest całkowicie mobilny i bezprzewodowy. W skład zestawu wchodzi ładowarka.

Uwaga: nie stosować urządzenia podczas ładowania ogniw elektrycznych.

Pytanie:

Jak zasilany jest system Waterpik w wersji stacjonarnej (Unit)?

Odpowiedź:

Zasilany jest prądem zmiennym 220V, który czerpie z sieci elektrycznej (tzw. gniazdka). Przewód prądowy ma długość 110 cm.

Nie wymaga uziemienia.

Pytanie:

Czym różni się Waterpik w wersji stacjonarnej (Unit) od bezprzewodowej?

Odpowiedź:

Oto cechy systemu w wersji stacjonarnej (Unit), które nie występują w wersji bezprzewodowej:

- 3 x wyższe ciśnienie strumienia wody,
- płynna regulacja strumienia wody,
- większy zbiornik wody 1000 ml,
- pracujący unit płuczący jest dużo cichszy wobec systemu bezprzewodowego,
- stale podłączone, niezbędne do pracy zasilanie 220V*
- przewód wodny o długości 100 cm łączący zbiornik wody z rękojeścią płuczącą*

* - maszyna trwale związana z miejscem pracy. Na wygodę pracy z pacjentem wpływa obecność przewodu wodnego.

Niezbędne napięcie 220V w czasie pracy urządzenia.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: