


Tablica do badania wrażliwości na kontrast Pelli-Robson

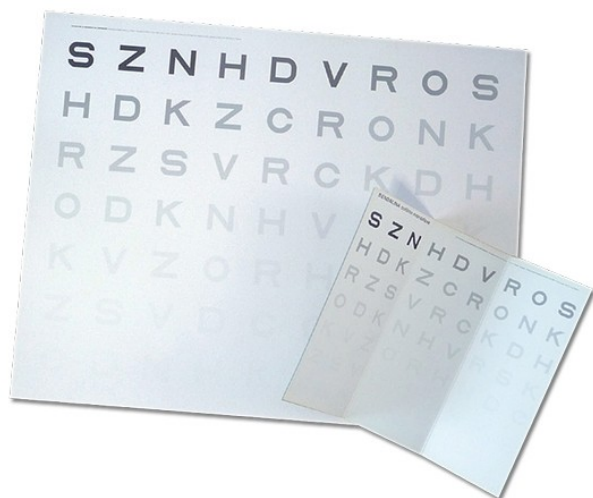

Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: 31318

Krótki opis:

Pomiar badania wrażliwości na kontrast Pelli-Robson jest szeroko stosowany przy badaniu pilotów i kierowców. Pomaga on we wczesnym wykryciu schorzeń cukrzyca stwardnienie rozsiane, katarakta czy zmiany na siatkówce.

Opis produktu

(Visual Function Test) wg Pelli-Robson. Jest to czuły test wykrywający zaburzenia funkcji wzroku pacjenta. Polega na czytaniu zestawów liter z trzech tablic o różnym kontraście z tłem: 100%, 2.5% oraz 1.25% nasycenia.

Zadaniem pacjenta jest czytanie kolejnych zestawów trzech liter, ustawionych w rzędy, od góry do dołu stojąc w dobrze oświetlonym pomieszczeniu 2 metry od tablicy. Możliwe jest używanie okularów lub soczewek korekcyjnych, z których pacjent korzysta na co dzień. Test trwa do momentu, gdy pacjent nie jest w stanie odczytać całego zestawu (trzech kolejnych liter w rzędzie). Ilość rozpoznanych liter w każdym rzędzie jest zliczana, a następnie wyniki są sumowane dla każdej tablicy. Test ten jest bardzo dobrym narzędziem pozwalającym ocenić zaburzenia wzrokowe, zwłaszcza u pacjentów z normalnym widzeniem w oparciu o test Snellena. Bardzo istotną z punktu widzenia badań klinicznych jest ocena zaburzeń funkcji poznawczych np. w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

rodzaj: dystans 40 cm, dystans 3 m