

Termometr bezdotykowy Vivaguard FT-100C



Nr Katalogowy VIVAGUARD FT-100C

Termometr bezdotykowy na podczerwień VivaGuard Model FT-100C- termometr czołowy, bezdotykowy w błyskawiczny sposób dokonujący pomiaru temperatury ciała.

Termometr bezdotykowy na podczerwień VivaGuard Model FT-100C- termometr czołowy, bezdotykowy w błyskawiczny sposób dokonujący pomiaru temperatury ciała.

Termometr na podczerwień wychwytuje ciepło z pola pomiarowego:

- czoło

Przed przystąpieniem do pomiaru ważne, aby:

- badany obszar był suchy – wystarczy przetrzeć dłonią czoło, aby uniknąć zakłóceń pomiaru
- dla uzyskania pełnej dokładności termometr powinien przed użyciem znajdować się w temperaturze otoczenia tzn. być wyciągnięty z szuflady, a nawet z etui
- odległość pomiaru bezdotykowego- im dalej od ciała, tym odczyt może być mniej prawdziwy. Prawidłowa odległość wynosi 2 cm
- miejsce pomiaru ma duże znaczenie (zalecane miejsca wyszczególniono w instrukcji)

- nie używać w przeciągu termometru na podczerwień

Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na podstawie temperatury odbieranej z czoła nie służy do badania pomiaru temperatury ciała z pod pachy.

- Przed przystąpieniem do pomiaru upewnij się że pole odbioru temperatury (czujka) nie zostało zabrudzone.
- Zalecana odległość pomiaru 2 cm
- Szybkość pomiaru 0,5 sekundy

Zestaw zawiera:

- termometr
- baterie

Charakterystyka produktu:

- Tryb pomiaru: na czole
- Tryb pracy 32-43 ° C (89,6 - 109,4 ° F)
- Odległość pomiaru: 2 cm
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 ° C / ° F
- Precyzja: 36 - 39 ° C (96,8 - 102,2 ° F): $\pm 0,2$ ° C ($\pm 0,36$ ° F)
- Wymiary: 162 x 50 x 35 mm
- Podświetlenie: niebieskie, zielone lub czerwone

Zakres działania urządzenia:

- Temperatura: 16 - 40 ° C (60,8 - 104 ° F)
- Wilgotność: $\leq 85\%$ RH

Warunki przechowywania urządzenia:

- Temperatura: -25 - 55 ° C (-13 - 131 ° F)
- Wilgotność: $\leq 95\%$ RH
- Baterie: 2 x 1,5 V AAA

Podświetlenie: 3 kolory - niebieski, zielony i czerwony