

Chusteczki do dezynfekcji stetoskopów 100 sztuk



Nr Katalogowy 1731000

Płatki - chusteczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym przeznaczone do dezynfekcji stetoskopów. Pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk.

wymiary (dł. x szer. x wys.): 50x50mm

Systematyczne czyszczenie stetoskopu zapewni jego optymalną wydajność, pomoże przedłużyć okres działania i utrzymać go w takim stanie, by długo wyglądał jak nowy.

Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia stetoskopów:

- Jeśli wymagana jest dezynfekcja stetoskopu, należy go przetrzeć płatkami nasączonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego.
- Nie należy używać ręczników papierowych itp - na stetoskopie mogą pozostać drobinki, które po połączeniu ze środkiem dezynfekującym mogą doprowadzić do jego zanieczyszczenia i zablokowania.
- Nie należy zanurzać stetoskopu w żadnych płynach ani nie wystawiać go na działanie żadnego procesu sterylizacyjnego.
- Należy trzymać stetoskop z dala od źródeł nadmiernego ciepła, chłodu, rozpuszczalników i olejów.

-
- W celu przeprowadzenia dokładnego oczyszczenia rekomendujemy zdjęcie oliwek. Po skończonym czyszczeniu należy je z powrotem docisnąć.
 - Więcej informacji na temat pielęgnacji, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego stetoskopu.